

Crest 3D White Whitestrips With LIGHT

Trei pași simpli pentru o albire ușoară



Dezlipiți

Pentru a obține cele mai bune rezultate, nu spălați dinții înainte de aplicare. Deschideți pliculețul și scoateți plasturii. Dezlipiți cei 2 plasturi de pe suportul de plastic.

Aplicați

Aplicați partea cu gel a plasturelui direct pe dinți. Aliniați plasturele cu gingia și apăsați ușor pentru un contact bun. Îndoțiți restul plasturelui după dinte pentru o fixare mai bună.

Albiți

Păstrați plasturii pe dinți timp de 60 de minute înainte de a folosi aparatul cu lampă. După o oră de la aplicarea plasturilor (nu îndepărtați plasturii) luați aparatul cu lampă și porniți-l apăsând simultan și continuu cele 2 butoane laterale până ce lampa pornește. Plasați lampa pe plasturele de sus și mențineți-o câteva minute până când aceasta se stinge automat. Porniți lampa din nou apăsând simultan și continuu cele 2 butoane laterale și plasați-o pe plasturele de jos, menținând-o câteva minute, până ce se stinge automat.

Îndepărtați lampa, plasturii și excesul de gel de pe dinți prin clătire sau cu un șervețel.

Atenție!

- ✚ Culoarea obținută după folosirea acestui tratament depinde de structura dinților dumneavoastră și nu poate fi mai deschisă decât albul natural inițial (momentul apariției dinților).
- ✚ Puteți avea o sensibilitate în timpul sau după terminarea tratamentului. Aceasta este normală și va dispărea în aproximativ 3-4 zile de la încetarea tratamentului.

Important!

- Nu lăsați produsul la îndemana copiilor!
- Este interzisă utilizarea produsului la copii cu vârste sub 12 ani!
- Nu inghițiți plasturii din plastic!
- Evitați contactul gelului cu ochii și pielea.
- Este interzis consumul de băuturi și alimente, fumatul sau dormitul în timpul purtării plasturilor!
- Evitați contactul gelului cu materialele textile!
- Depozitați produsul într-un loc răcoros, ferit de soare.
- Nu folosiți produsul dacă purtați un aparat dentar!
- Este contraindicată folosirea produsului în următoarele cazuri: dinți crăpați, dinți puși, paradontoză, carii.

Cum imi mențin nivelul de albire dorit după terminarea tratamentului?

Folosind tratamentul **Crest 3D White Monthly Whitening Boost**. Acest tratament se aplică o dată pe luna timp de 12 luni sau puteți folosi zilnic o pastă de dinți din gama **Crest 3D White** pentru a vă proteja smalțul împotriva noilor pete.

Pentru alte întrebări legate de folosirea produselor noastre vă rugăm accesați secțiunea noastră specială de "Întrebări Frecvente" la următoarea adresă: <http://www.coolsmile.ro/faq.html> sau contactați-ne telefonic la următoarele nr. de telefon **0741 145 725** sau **0723 680 260**