

Fairywill Whitestrips PRO Whitening

Trei pași simpli pentru o albire ușoară



Dezlipiți

Pentru a obține cele mai bune rezultate, nu spalați dinții înainte de aplicare. Deschideți pliculețul și scoateți plasturii. Dezlipiți cei 2 plasturi de pe suportul de plastic.

Aplicați

Aplicați partea cu gel a plasturelui direct pe dinți. Aliniați plasturele cu gingia și apăsați ușor pentru un contact bun. Îndoți restul plasturelui după dinte pentru o fixare mai bună.

Priviți

Purtați plasturii timp de 30 de minute o dată pe zi apoi dezlipiți-i și aruncați-i. Excesul de gel de pe dinți îndeparați prin clătire sau cu un șervețel.

Plasturii sunt comozi și ușor de folosit. Practic, puteți să-i purtați oriunde, în timp ce:

- ✓ Faceți duș / navigați pe internet / mergeți la muncă
- ✓ Vorbiți la telefon / vă uitați la TV / conduceți mașina

Atenție!

- ✚ Culoarea obținută după folosirea acestui tratament depinde de structura dinților dumneavoastră și nu poate fi mai deschisă decât albul natural inițial (momentul apariției dinților).
- ✚ Puteți avea o sensibilitate în timpul sau după terminarea tratamentului. Aceasta este normală și va dispărea în aproximativ 3-4 zile de la încetarea tratamentului.

Important!

- Nu lăsați produsul la îndemana copiilor!
- Este interzisă utilizarea produsului la copii cu vârste sub 12 ani!
- Nu inghițiți plasturii din plastic!
- Evitați contactul gelului cu ochii și pielea.
- Este interzis consumul de băuturi și alimente, fumatul sau dormitul în timpul purtării plasturilor!
- Evitați contactul gelului cu materialele textile!
- Depozitați produsul într-un loc răcoros, ferit de soare.
- Nu folosiți produsul dacă purtați un aparat dentar!
- Este contraindicată folosirea produsului în următoarele cazuri: dinți crăpați, dinți puși, paradontoză, carii.

Cum îmi mențin nivelul de albire dorit după terminarea tratamentului?

Folosind orice pastă de dinți cu efect de albire din gama noastră de produse. Aceste paste de dinți protejează smalțul dinților împotriva noilor pete. Totuși, o dată la 2-3 ani este recomandat folosirea unui nou tratament de albire.

Pentru alte întrebări legate de folosirea produselor noastre vă rugăm accesați secțiunea noastră specială de "Întrebări Frecvente" la următoarea adresă: <http://www.coolsmile.ro/faq.html> sau contactați-ne telefonic la următoarele nr. de

telefon **0741 145 725** sau **0723 680 260**